

病理クラウドシステム



ご利用説明



ログイン方法

Medmain

ようこそ

PidPort を使用するには Medmain Inc. にログインしてください。

メールアドレス

パスワード

パスワードをお忘れですか？


続ける




ID・パスワードはプログラム・抄録集の9ページをご確認ください。

【ログイン用URL】 <https://pidport.com>
※ プログラム・抄録集の9ページに記載のID,PWでログインしてください。


基本操作

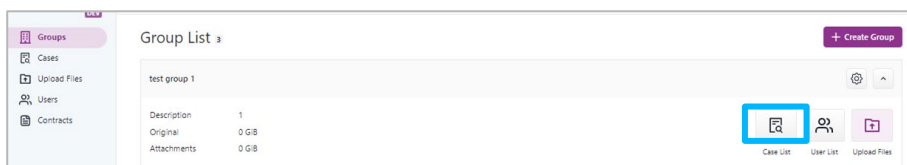

Case Listをクリックします

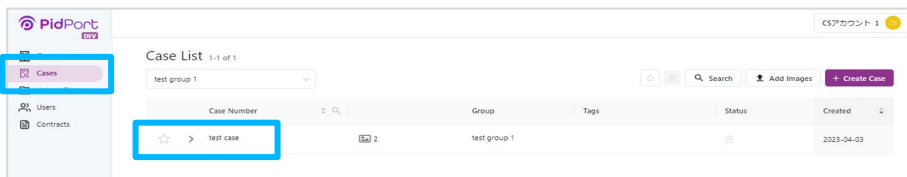

Case を選択します

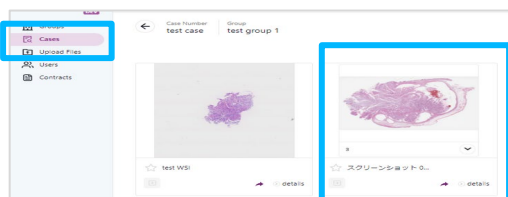


画像を選択します



WSIが閲覧できます

機能紹介

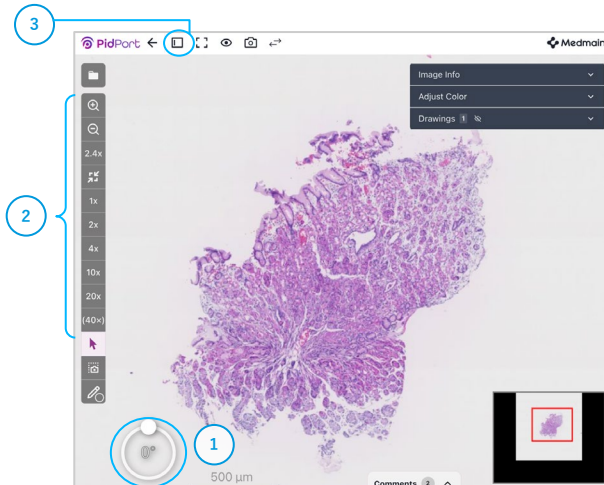

①画像回転

円周上の位置をクリックして、回転させることが可能

②Zoom in & Zoom out

マウスのマウスホイールもしくは、画面左の固定倍率で操作可能

③画面分割

最大4枚のWSIを同時閲覧可能